



Thermo Scientific Samco Clicktainer バイアル


独自のクリックシステムで
サンプルの保護と使用者の安全性を確保

ユーザーセーフティー & サンプルプロテクション


Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ バイアルは、お客さまの貴重なサンプルを大切に取り扱いできるようにサポートします。

- 簡単なサンプル回収
- 安心のサンプル輸送
- 大きな開口部と液漏れ防止キャップ
- キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるマルチクリック設計

マルチクリック

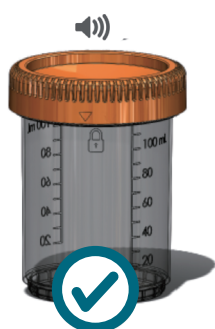

クリックなし

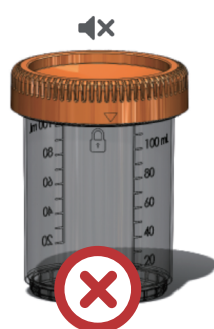

CLICK SEAL SYSTEM

キャップの矢印がバイアルのロックマークを越えるまで、キャップをカチッという音が聞こえなくなるまで完全に締めます。これで漏れない性能が得られます。

矢印がロックマークを越えないとキャップの密閉性が十分ではなく、漏れる可能性があります。

クリックテイナーキャップ

- 目と耳と手でキャップが締まったことを確認できます
- クリック音がなくなるとキャップの矢印が過ぎる所までキャップを締めると合図になります

液漏れ防止機能*

- 95 kPa バキューム試験を実施
- 漏れ試験を実施 (BS EN 14254 準拠)

透明性

- 内容量や目盛りの確認が簡単

容量と広口デザインの種類

- 120 mL と 90 mL の容量で幅広いアプリケーションに適している
- キャップは 53 mm のワイドサイズ

凍結可能

- 容量の 80% 試料で -80°C まで保存可能

選べる滅菌・未滅菌

- ガンマ線滅菌
- 滅菌保証レベルは SAL 10⁻⁶

ベースデザイン

- キャップ上部と本体下部に刻み
- 手袋着用時に取り扱いが容易



積み重ね可能

- 保管場所の有効活用を実現

*「液漏れ防止」は、以下の基準を満たす Samco Clicktainer 製品 (90 mL/53 mm および 120 mL/53 mm) に適用されます。

a) 漏れない密閉チャンバー内で 95 kPa の圧力をかける真空試験。b) BS EN 14254 に準拠した漏れ試験。この試験では、容器に色素を充填し、ローラーミキサーに 2 分間置き、その後ウォーターバスに 1 時間倒立させます。

注：これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、Samco Clicktainer のバイアルについて、予定しているアプリケーションの条件下で事前に評価試験を実施されることを推奨しています。Samco Clicktainer バイアルは、対応する Clicktainer 用キャップと併用した場合に、常温・常圧で液漏れがありません。

さまざまなラベルデザイン・ キャップカラー・梱包形態

検体内容や必要情報を認識しやすいラベル

- タブ付き/タブなし ラベル
- ラベルなし
- 温度ストリップ付きラベル
- 温度ストリップのみ
- 言語種類 (英語/スペイン語/フランス語)

STERILE

TIGHTEN TO "CLICK"
APRIETE PARA HACER "CLICK"
SERRER JUSQU'AU "CLICK"


Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ Vial

Full Name / Nom Complet / Nombre Completo:	Date of Birth / Date de Naissance: Fecha de Nacimiento:
Medical Number / Número clínico / Número d'identification:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Date / Fecha: Time / Heure / Hora:

Made in Mexico
Thermo Fisher Scientific (Monterrey) S. de R.L. de C.V.
Blvd Apodaca 500, Apodaca Technology Park,
Apodaca, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 66600

STERILE R IVD

091109-10064

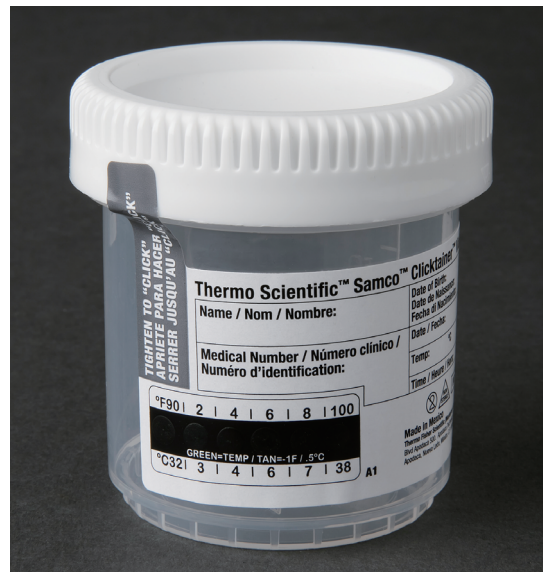

サンプル認識に役立つキャップカラー

- 3色のキャップカラー

選べるパッケージ

- ラボでの使用に便利な本体/キャップ組み立て済み梱包
- 組織学、尿分析、水分析のアプリケーションとして機器で自動分注する際に便利なキャップ/本体別梱包
- クリーンルームなどでの使用に便利な滅菌済み個包装
- 取り出しが簡単なディスペンサーボックスタイプ

アプリケーション例

- 液体や固体の採取・運搬に
- 尿、便、痰など、貴重で感染リスクを伴う患者サンプル回収に
- ホルモンや組織検査用の固定剤の保存・使用に
- 研究、食品、飲料などのサンプル管理に



製品番号	ラベル有無	仕様	容量 (mL)	キャップカラー	フォーマット	滅菌	入数 (個数×パック)	希望小売価格
120 mL/53 mm キャップ								
120ORG53-1000	●	タブ付ラベル	120	オレンジ	組立品	●	75 × 4	¥46,900
120WHT53-1000	●	タブ付ラベル	120	白色	組立品	●	75 × 4	¥46,900
120WHT53-2000	—	ラベルなし	120	白色	キャップ/ バイアル別	—	300 × 1	¥37,600
120ORG53-2000	●	タブ付ラベル	120	オレンジ	組立品	—	75 × 4	¥37,600
120WHT53-3000*	●	中間尿キット、漏斗なし、タブ付ラベル	120	白色	組立品	●	個包装 × 100	¥20,400
120ORG53-4000	—	ラベルなし、個包装	120	オレンジ	組立品	●	個包装 × 100	¥18,800
120WHT53-4000	—	ラベルなし、個包装	120	白色	組立品	●	個包装 × 100	¥18,800
90 mL/53 mm キャップ								
90ORG53-1000	●	タブ付ラベル	90	オレンジ	組立品	●	100 × 4	¥44,600
90WHT53-1000	●	タブ付ラベル	90	白色	組立品	●	100 × 3	¥34,500
90GRN53-1000	●	タブ付ラベル	90	緑	組立品	●	100 × 4	¥44,600
90ORG53-1001	●	タブ付ラベル、ディスペンサーパック	90	オレンジ	組立品	●	20 × 16	¥50,100
90WHT53-1001	●	温度ストリップ付ラベル	90	白色	組立品	●	100 × 3	¥42,300
90WHT53-1002	●	温度ストリップのみ	90	白色	組立品	●	100 × 4	¥54,800
90WHT53-2000	●	タブなしラベル	90	白色	組立品	—	75 × 4	¥32,900
90WHT53-2001	●	温度ストリップ付ラベル	90	白色	組立品	—	300 × 1	¥42,300
90WHT53-2002	—	ラベルなし	90	白色	キャップ/ バイアル別	—	300 × 1	¥32,900
90WHT53-2003	—	ラベルなし	90	白色	組立品	—	300 × 1	¥32,900
90WHT53-2004	●	温度ストリップのみ	90	白色	組立品	—	100 × 4	¥43,800
キャップなし								
9000-5300	—	ラベルなし	90	—	バイアルのみ	—	300	¥23,500
12000-5300	—	ラベルなし	120	—	バイアルのみ	—	300	¥18,800
キャップのみ								
CAPWHT53-1000	—	—	—	白色	キャップのみ	—	1,500	¥46,900
CAPORG53-1000	—	—	—	オレンジ	キャップのみ	—	1,500	¥46,900
CAPGRN53-1000	—	—	—	緑	キャップのみ	—	1,500	¥46,900

* 中間尿採取用

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/clicktainer

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

©2017, 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2022年1月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **LSP014-B21110B**

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

 facebook.com/ThermoFisherJapan

 [@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

thermofisher.com

thermo scientific