

PathoDx

Réactifs pour virus

REF	R62411
	R62405
	R62406
	R62407
	R62408
	R62409
	R62410

1. DOMAINE D'APPLICATION

Les réactifs supplémentaires PathoDx™ de Remel, destinés à l'identification des virus respiratoires, sont conçus pour une utilisation avec le kit pour virus respiratoires (RVP) PathoDx, lequel contient tous les composants nécessaires aux tests. Ces réactifs constituent des composants de remplacement. **Pour plus d'informations et pour une utilisation correcte de ce produit, se référer au mode d'emploi fourni avec le kit pour virus respiratoires PathoDx (R62400).**

2. DESCRIPTION, PREPARATION ET CONDITIONS DE CONSERVATION RECOMMANDEES

Voir également le paragraphe **Précautions et restrictions d'emploi**.



Conserver entre 2 et 8°C.

RSV

Réactif pour VRS (bouchon gris)
Un flacon compte-goutte contenant 2,0 ml d'anticorps monoclonaux murins spécifiques purifiés, marqués à la fluorescéine dans une solution tampon contenant un stabilisateur protéinique, un colorant de contraste (bleu Evans) et 0,098% d'azide de sodium (conservateur).

INFLUENZA | A

Réactif pour influenza de type A (bouchon bleu)
Un flacon compte-goutte contenant 2,0 ml d'anticorps monoclonaux murins spécifiques purifiés, marqués à la fluorescéine dans une solution tampon contenant un stabilisateur protéinique, un colorant de contraste (bleu Evans) et 0,098% d'azide de sodium (conservateur).

INFLUENZA | B

Réactif pour influenza de type B (bouchon violet)
Un flacon compte-goutte contenant 2,0 ml d'anticorps monoclonaux murins spécifiques purifiés, marqués à la fluorescéine dans une solution tampon contenant un stabilisateur protéinique, un colorant de contraste (bleu Evans) et 0,098% d'azide de sodium (conservateur).

PARAINFLUENZA | 1

Réactif pour parainfluenza de type 1 (bouchon vert)
Un flacon compte-goutte contenant 2,0 ml d'anticorps monoclonaux murins spécifiques purifiés, marqués à la fluorescéine dans une solution tampon contenant un stabilisateur protéinique, un colorant de contraste (bleu Evans) et 0,098% d'azide de sodium (conservateur).

PARAINFLUENZA | 2

Réactif pour parainfluenza de type 2 (bouchon orange)
Un flacon compte-goutte contenant 2,0 ml d'anticorps monoclonaux murins spécifiques purifiés, marqués à la fluorescéine dans une solution tampon contenant un stabilisateur protéinique, un colorant de contraste (bleu Evans) et 0,098% d'azide de sodium (conservateur).

PARAINFLUENZA | 3

Réactif pour parainfluenza de type 3 (bouchon blanc)
Un flacon compte-goutte contenant 2,0 ml d'anticorps monoclonaux murins spécifiques purifiés, marqués à la fluorescéine dans une solution tampon contenant un stabilisateur protéinique, un colorant de contraste (bleu Evans) et 0,098% d'azide de sodium (conservateur).

ADENOVIRUS

Réactif pour adénovirus (bouchon jaune)
Un flacon compte-goutte contenant 2,0 ml d'anticorps monoclonaux murins spécifiques purifiés, marqués à la fluorescéine dans une solution tampon contenant un stabilisateur protéinique, un colorant de contraste (bleu Evans) et 0,098% d'azide de sodium (conservateur).

3. PRECAUTIONS ET RESTRICTIONS D'EMPLOI

IVD

Les réactifs sont destinés exclusivement au diagnostic *in vitro*.

Réservé uniquement à un usage professionnel.

Pour obtenir des informations sur les composants potentiellement dangereux, voir la fiche de sécurité fournie par le fabricant et l'étiquette du produit.

INFORMATIONS DE SECURITE

- De l'azide de sodium d'une concentration de 0,098% a été ajouté aux réactifs pour son rôle antibactérien. Pour prévenir l'accumulation d'azides métalliques explosifs dans les canalisations en plomb et en cuivre, les réactifs ne doivent être déversés dans le système d'égouts que s'ils sont dilués et mélangés à de grands volumes d'eau. Utiliser si possible des canalisations ne contenant pas de plomb ou de cuivre.
- Echantillons cliniques : Les précautions de sécurité adéquates doivent être respectées lors de la manipulation et du traitement de tous les échantillons cliniques, du fait de la présence potentielle d'organismes vivants pathogènes. Manipuler les cultures susceptibles de contenir des virus infectieux conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.

- Déchets : Stériliser tous les déchets avant de les mettre au rebut conformément aux procédures de laboratoire standard et aux réglementations locales.
- Présence du colorant bleu Evans dans le réactif. Bien que le produit soit en concentrations inférieures à celles qui requièrent qu'on le classe comme cancérigène, éviter tout contact avec la peau.

4. CONDITIONNEMENT

REF	R62411.....Réactif pour VRS
	R62405.....Réactif pour Influenza A
	R62406.....Réactif pour Influenza B
	R62408.....Réactif pour Parainfluenza 1
	R62409.....Réactif pour Parainfluenza 2
	R62410.....Réactif pour Parainfluenza 3
	R62407.....Réactif pour adénovirus

Légende des symboles

REF	Numéro de référence
IVD	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
LAB	Utilisation en laboratoire
	Consulter le mode d'emploi
	Limite de température (température de conservation)
LOT	Code de lot (numéro de lot)
	A utiliser avant le (date de péremption)
	Fabricant



PathoDx est une marque de commerce déposée de Remel Inc.

IFU X7792 révisé Novembre 2012

Remel Europe Ltd.
Clipper Boulevard West, Crossways
Dartford, Kent, DA2 6PT
Royaume-Uni

Pour obtenir une assistance technique, contacter le distributeur local.