

PathoDx

Reagenti per virus respiratori

REF	R62411
	R62405
	R62406
	R62407
	R62408
	R62409
	R62410

1. FINALITÀ D’USO

I reagenti per virus respiratori Remel PathoDx™ supplementari sono destinati all’uso con il kit per virus respiratori (RVP) PathoDx, che contiene tutti i componenti necessari per il sistema di test. I presenti reagenti vengono forniti come elementi di sostituzione. **Per informazioni complete sull’uso corretto di questo prodotto, fare riferimento alle Istruzioni per l’uso allegate al kit per virus respiratori PathoDx (R62400).**

2. DESCRIZIONE, PREPARAZIONE PER L’USO E RACCOMANDAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Fare riferimento anche alla sezione **Avvertenze e precauzioni di impiego**.



Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 8°C.

RSV

Reagente per virus respiratorio sinciziale (RSV) (tappo grigio)

Un flacone contagocce contenente 2,0 ml di anticorpi monoclonali di topo specifici, purificati e marcati con fluoresceina, e colorante di contrasto blu di Evans in soluzione tampone stabilizzata tramite proteine, con lo 0,098% di sodio azide come conservante.

INFLUENZA A

Reagente per influenza A (tappo blu)

Un flacone contagocce contenente 2,0 ml di anticorpi monoclonali di topo specifici, purificati e marcati con fluoresceina, e colorante di contrasto blu di Evans in soluzione tampone stabilizzata tramite proteine, con lo 0,098% di sodio azide come conservante.

INFLUENZA B

Reagente per influenza B (tappo viola)

Un flacone contagocce contenente 2,0 ml di anticorpi monoclonali di topo specifici, purificati e marcati con fluoresceina, e colorante di contrasto blu di Evans in soluzione tampone stabilizzata tramite proteine, con lo 0,098% di sodio azide come conservante.

PARAINFLUENZA 1

Reagente per parainfluenza 1 (tappo verde)

Un flacone contagocce contenente 2,0 ml di anticorpi monoclonali di topo specifici, purificati e marcati con fluoresceina, e colorante di contrasto blu di Evans in soluzione tampone stabilizzata tramite proteine, con lo 0,098% di sodio azide come conservante.

PARAINFLUENZA 2

Reagente per parainfluenza 2 (tappo arancione)

Un flacone contagocce contenente 2,0 ml di anticorpi monoclonali di topo specifici, purificati e marcati con fluoresceina, e colorante di contrasto blu di Evans in soluzione tampone stabilizzata tramite proteine, con lo 0,098% di sodio azide come conservante.

PARAINFLUENZA 3

Reagente per parainfluenza 3 (tappo bianco)

Un flacone contagocce contenente 2,0 ml di anticorpi monoclonali di topo specifici, purificati e marcati con fluoresceina, e colorante di contrasto blu di Evans in soluzione tampone stabilizzata tramite proteine, con lo 0,098% di sodio azide come conservante.

ADENOVIRUS

Reagente per adenovirus (tappo giallo)

Un flacone contagocce contenente 2,0 ml di anticorpi monoclonali di topo specifici, purificati e marcati con fluoresceina, e colorante di contrasto blu di Evans in soluzione tampone stabilizzata tramite proteine, con lo 0,098% di sodio azide come conservante.

3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI IMPIEGO

IVD

Esclusivamente per uso diagnostico *in vitro*.

Esclusivamente per uso professionale.

Per informazioni su componenti potenzialmente pericolosi, fare riferimento ai prospetti informativi sulla sicurezza forniti dal produttore e alle informazioni riportate sulle etichette dei prodotti.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Ai reagenti è stato aggiunto sodio azide quale agente antibatterico, con una concentrazione inferiore allo 0,098%. Per evitare la formazione di azidi di metallo esplosive a contatto con tubazioni in piombo o rame, i reagenti possono essere gettati nella rete fognaria solo se diluiti con grandi volumi di acqua. Se possibile, utilizzare tubazioni di scarico in materiali diversi da piombo e rame.
- Campioni clinici: è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza durante la manipolazione e il trattamento di tutti i campioni clinici, poiché possono essere presenti agenti patogeni attivi. Attenersi a una buona pratica di laboratorio durante la manipolazione di colture che si sospetta contengano virus infettivi.

- Rifiuti: sterilizzare tutti i rifiuti prima dello smaltimento, in conformità con le procedure di laboratorio standard e le normative locali.
- Nel Reagente è presente il colorante blu di Evans. Sebbene la concentrazione presente sia inferiore alla percentuale necessaria affinché il prodotto sia classificato come cancerogeno, è necessario evitare il contatto con la pelle.

4. CONFEZIONE

REF R62411.....Reagente per virus respiratorio sinciziale (RSV)
R62405.....Reagente per influenza A
R62406.....Reagente per influenza B
R62408.....Reagente per parainfluenza 1
R62409.....Reagente per parainfluenza 2
R62410.....Reagente per parainfluenza 3
R62407.....Reagente per adenovirus

REF	Numero catalogo
IVD	Dispositivo medico per la diagnostica <i>in vitro</i>
LAB	Per uso in laboratorio
	Consultare le istruzioni per l’uso
	Limiti di temperatura
LOT	Numero lotto
	Data di scadenza
	Fabbricante



PathoDx™ è un marchio di fabbrica registrato di Remel Inc.

IFU X7792 rivisto novembre 2012

 Remel Europe Ltd.
Clipper Boulevard West, Crossways
Dartford, Kent, DA2 6PT
Regno Unito

Per l’assistenza tecnica, rivolgersi al distributore di zona.